

B 33 Schnelldesinfektion

Gebrauchsfertig

SCHNELL-
DESINFEKTION



B33



Produktinformation

Aldehydfreie Gebrauchslösung für die Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten gem. EU-Medizinprodukteverordnung (EU-MDR), medizinischem Inventar sowie für alle Bereiche, in denen ein hygienisch einwandfreier Zustand notwendig ist gem. EU-Biozidprodukteverordnung (EU-BPR).

- Sehr schnelle Einwirkzeit.
- Umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und alle Viren (viruzid gegen behüllte und unbehüllte Viren).
- Geprüft nach den aktuellen VAH-Methoden und europäischen Normen.
- Viruzid gemäß DVV/RKI-Leitlinie und EN 14476.
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Rasches Auftrocknen.
- Einfache Applikation.
- Mit Zitronenduft.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit	Konz.	Einwirkzeit		
Flächendesinfektion (VAH-Methoden) ¹⁾	100 %	1 Min.		
Bakterien ¹⁾ und Hefepilze ¹⁾	100 %	1 Min.		
MRSA ²⁾	100 %	1 Min.		
Mykobakterien ¹⁾	100 %	1 Min.		
Tb-Bakterien ¹⁾	100 %	1 Min.		
Schimmelpilze ¹⁾	100 %	2 Min.		
Viren	Behüllte Viren inkl. HBV, HCV und HIV ^{3), 4)}	100 %	30 Sek.	
	Unbehüllte Viren ^{1), 3)}	Adenoviren ^{1), 3)}	100 %	1 Min.
		Noroviren ^{1), 3)}	100 %	30 Sek.
		Polyomaviren SV 40 ³⁾	100 %	1 Min.
		Polioviren ^{1), 3)}	100 %	1 Min.

¹⁾ Prüfung bei geringer und hoher Belastung (VAH, EN 13624, EN 13727 EN 14348, EN 14476, EN 16615).

²⁾ Wirksamkeit gegen Bakterien schließt Wirksamkeit gegen MRSA ein.

³⁾ Prüfung ohne und mit Belastung gemäß DVV/RKI-Leitlinie.

⁴⁾ Gemäß RKI-Stellungnahme (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

PRÜFUNGEN VON B 33

DVV/RKI-Leitlinie, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, 4-Felder-Test gemäß VAH und EN 16615.

LISTUNGEN VON B 33

VAH-Liste

IHO-Desinfektionsmittelliste

ANWENDUNG

B 33 wird unverdünnt angewendet. B 33 auf ein Tuch geben und Oberflächen vollständig benetzen. Zu desinfizierende Oberflächen und Gegenstände abwischen und Präparat einwirken lassen. Sichtbar kontaminierte Flächen mit B 33 desinfizieren und Kontamination aufnehmen. Gereinigte Flächen noch einmal desinfizieren. Auf vollständige Benetzung während der gesamten Einwirkzeit achten. Die Einwirkzeit beträgt gemäß VAH 1 Min., für Schimmelpilze 2 Min. und für Viren 30 - 60 Sekunden. Mit B 33 getränkte oro® Vliestücher standard/kompakt analog anwenden.

Bitte
wenden!

Produktinformation **B 33 Schnelldesinfektion**

HINWEISE

Vorsicht bei alkoholempfindlichen Materialien, wie z. B. Acrylglas. Bei empfindlichen Oberflächen Beständigkeit an verdeckter Stelle prüfen. B 33 nicht mit anderen Produkten mischen. Das Auftrocknen von B 33 auf Aluminiumoberflächen ist zu vermeiden. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz siehe DGUV 107-002/BGR 206. Es kann zu Abweichungen von Produktfarbe/Geruch kommen, insbesondere bei der Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farb- bzw. Geruchsveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Desinfektionsleistung des Produktes. Nur für gewerbliche Anwender. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

B 33 enthält Alkohole und Quartäre Ammoniumverbindungen. 100 g enthalten 55,5 g Ethanol, 10 g 1-Propanol, 0,05 g Didecyl-dimethylammoniumchlorid, Hilfsstoffe und Wasser.

PACKUNGSGRÖßE

10 L-Kanister
6 x 1 L im Karton

ZUBEHÖR

Kanisterhahn, Kanisterschlüssel, Sprühflasche, Dosierpumpe für 1 L-Flasche, Sprühkopf für 1 L-Flasche

HALTBARKEIT

3 Jahre; Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Jahre
Bei Anwendung mit oro® Vliestücher standard/kompakt 3 Monate (siehe auch Produktinformation oro® Vliestücher).

LAGERUNG

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern

PHYSIKALISCHE DATEN

Wirkstofflösung:

Aussehen:	klare, farblose Lösung
Dichte:	D = 0,87 ± 0,02 g/cm ³ (20 °C)
Flammpunkt:	23 °C

ÖKOLOGIE

B 33 ist biologisch leicht abbaubar gemäß OECD-Richtlinie 301 D. Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Kanister mit Wasser ausspülen.

GEFAHRENHINWEISE

B 33 ist nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet: siehe Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt.

UNABHÄNGIGES GUTACHTEN - Eigene Untersuchungen

Die Gutachten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

CE 0124

B 33 vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Biozid-Reg-Nr. N-76581.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei uns jederzeit angefordert werden können.

Fragen Sie uns nach weiteren Präparaten des oro® Hygienesystems:

Instrumentendesinfektion ▪ Desinfektion von Flächen und Inventar
Desinfektion und Pflege von Händen und Haut ▪ Spezialanwendungen ▪ Zubehör